

保証について

保証書は、日本国内においてのみ有効です。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従いまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合は、お買い上げの販売店またはピジョン(株)お客様相談室までお問い合わせください。

保証書

品名	さく乳ボトルキット	保証期間	お買い上げ日より1年間
		お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
		電話 ()	
販売店	店名		
	住所 〒		
		電話 ()	

*太枠内の記入なき場合は無効となりますので、必ずご記入ください。

*ただし、お買い上げ時のレシートまたは販売証明書の添付でも有効です。

保証規定

- 有効保証期間は、「お買い上げ後1年間」です。
- ご使用中、万一、故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはピジョンお客様相談室へ現品に保証書をそえて、修理をご依頼ください。
- ただし、下記の場合は保証期間中でも有償になります。
 - (イ) ご使用上で取り扱いの過誤により発生した故障。
 - (ロ) 製品の改造あるいは不当な修理により発生した故障。
 - (ハ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - (ニ) 消耗部品。
 - (ホ) 保証書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 保証書各項目の記入モレ、捺印モレ、あるいは字句が訂正されている場合。
- 保証書は再発行いたしません。(大切に保管してください。)

ピジョン株式会社 〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4-4

ピジョンホームページ お客様サポート <https://support.pigeon.co.jp/>

(お客様相談室) TEL: 0120-741-887

受付時間: 9時~17時(土・日・祝日を除く)



pigeon

母乳育児を
家族みんなで
楽しみましょう。

ピジョン 母乳アシスト

さく乳ボトルキット

取扱説明書

このたびは、ピジョンさく乳ボトルキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管してください。



もくじ

使う

- P.2 各部のなまえ
- P.3 お使いになる前に
- P.5 組み立てかた
- P.8 さく乳のしかた
- P.9 母乳保存のしかた

● 知ってほしいこと

- P.1 安全上のご注意
- P.13 製品仕様
- 裏表紙 保証について

● こんなとき

- P.11 お手入れのしかた
- P.12 上手にさく乳できないとき
- P.14 部品のご購入について

「母乳アシスト」「母乳実感」は、ピジョン(株)の登録商標(日本国内)です。

安全上のご注意

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人がキズを負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

指示 製品使用上、必ず実行していただきたい内容を示します。

禁止 製品使用上、禁止行為を示します。

警告


乳幼児の手の届くところに置かない。
誤って部品を飲み込んだり、ケガの恐れがあります。



さく乳以外の目的で、使わない。
思わぬ事故の原因になります。

注意

びんに160ml以上、さく乳しない。
さく乳した母乳があふれる恐れがあります。

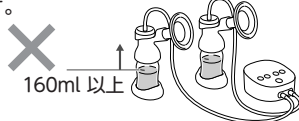

過度の使用、連続しての吸引をしない。
乳房をいためる恐れがあります。

乳房がいたむときは、使わない。
(さく乳しない。)

症状が悪化する恐れがあります。

シンナー・ベンジン・アルコールなどで拭かない。
変形・破損の原因になります。

研磨剤の入った洗剤は使わない。
キズが付く原因になります。

火の近くに置かない。
変形・破損の原因になります。


落としたり倒したりなど、強い衝撃を与えない。
破損や故障の原因になります。

使う前には毎回、キズ・割れ・欠け・変形などの異常がないことを確認してから使う。

さく乳は手を清潔にして行う。

使う前に、必ず洗える部品の洗浄・消毒を行う。

各部のなまえ

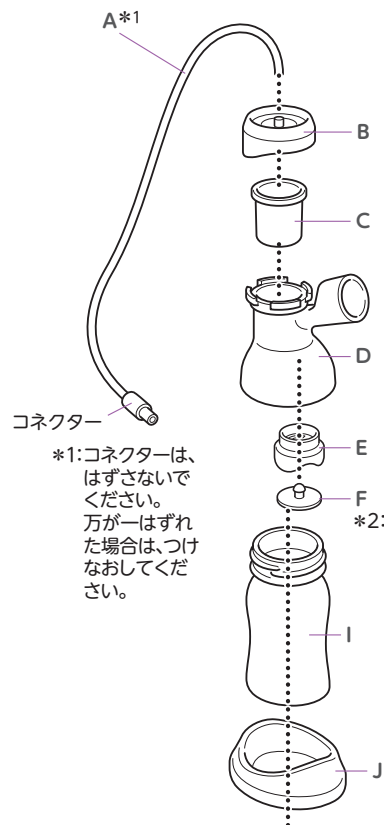

*1: コネクターは、はずさないでください。
万が一はずれた場合は、つけないお過ごしください。


*2: 予備1個付き

*3: さく乳口のフチが一部、へこんでいますが問題ありません。

	部 品	個 数
A	チューブ(コネクター付き)	1
B	本体キャップ	1
C	ソフトカップ	1
D	本体	1
E	シリコンキャップ	1
F	シリコン弁	2 (予備1個含む)
G	さく乳口 (Mサイズ)	1
H	さく乳口パッド (Mサイズ)	1
I	びん	1
J	ボトルスタンド	1
K	キャップ	1
L	母乳保存用シリコン蓋	1

■ 付属品

付属品をびんにセットすると、冷蔵保存できます。

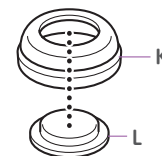

お使いになる前に

1 分解


購入時にセットされている部品は、分解してください。

本体部



購入時はセットされています。



1 本体キャップを回してはずします。

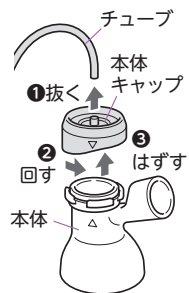

2 ソフトカップを取り出します。

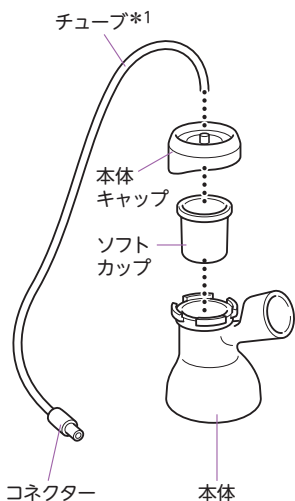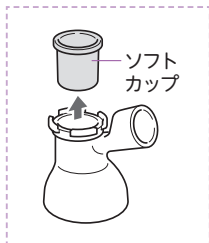


シリコンキャップ

1 シリコンキャップからシリコン弁をはずします。



さく乳口部

購入時はセットされています。

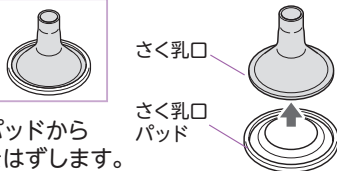

1 さく乳口パッドからさく乳口をはずします。

③

2 洗浄

洗剤で、部品をよく洗ってください。

※洗浄には「哺乳びん野菜洗い」などの洗剤をご使用ください。

3 消毒

洗浄後、①②③のいずれかの方法で消毒してください。

①煮沸消毒の場合

大きな鍋に水をたっぷり入れ、よく洗浄した部品を入れて、火にかけて沸とうさせます。(消毒時間は、沸とう後、3～5分)


※水をたっぷり入れて煮沸しないと、鍋のフチについて変形する恐れがあります。

※過度の煮沸をすると、商品を早くいためる恐れがあります。



②電子レンジ消毒の場合

電子レンジ消毒専用の容器（「ピジョン電子レンジスチーム&薬液消毒ケース」など）を使います。詳しくは、電子レンジ消毒専用の容器・ご使用の電子レンジの取扱説明書に従ってください。

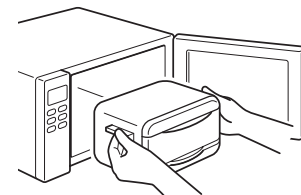

※部品をそのまま電子レンジに入れて、消毒することはできません。

③薬液消毒の場合

哺乳びん・乳首専用の消毒液（「ピジョンミルクポン」など）を使います。詳しくは、消毒液の取扱説明書に従ってください。

※薬液消毒の場合、哺乳びんの色が薄くなる場合があります。



部品を組み立ててください。
(P.5～7参照)

④


組み立てかた

★組み立て前に、石けんで手をよく洗って清潔にしてください。


- ご使用前に必ず、分解・洗浄・消毒してください。(P.3・4参照)
- 洗浄・消毒したあとは、水気を完全に取ってから、組み立ててください。

1 シリコン弁をシリコンキャップに差し込みます。

※差し込む方向を間違えないように注意してください。

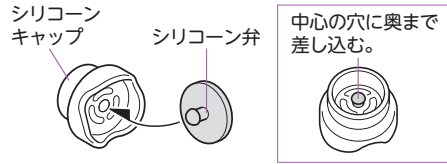

2 シリコンキャップを本体裏面に奥まで、はめ込みます。

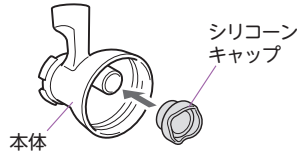

3 ソフトカップを本体に入れます。

◆ポイント

ソフトカップが裏返しになっていないか確認してください。

△注意

ソフトカップに水気やホコリが付いていないか確認してからお使いください。特にソフトカップの内側に水気やホコリが付いていると、故障の原因になります。

	正しい向き	裏返し
見た図	中に細い線がある	段差がある
断面図		




4 本体キャップの▽を本体の△に合わせてはめ込み、時計回りに止まるまで回します。



⑤


5 本体をびんに取り付けます。

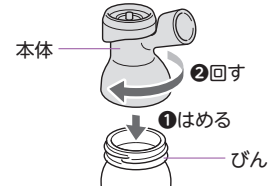

6 さく乳口をさく乳口パッドにはめ込みます。


◆ポイント

使用感のお好みで、さく乳口パッドを取り付けずに使うこともできます。


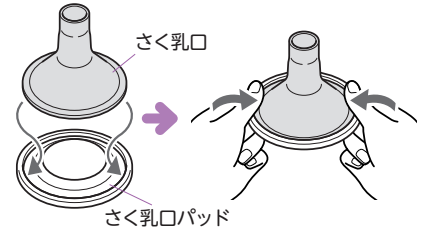


確認ポイント さく乳口取り付けの際、以下のポイントを確認してください。


①さく乳口は確実にさく乳口パッドにはめ込まれていますか？

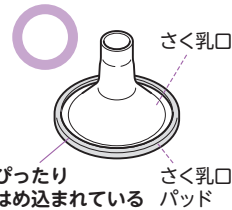

②さく乳口を正面から見て、さく乳口パッドの内側はきれいな円になっていますか？

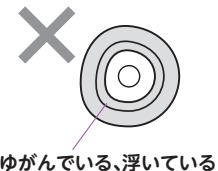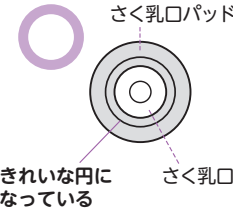


③さく乳口パッドの内側は、さく乳口にぴったりと密着していますか？

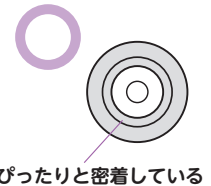

⑥

組み立てかた

- 7 さく乳口を本体にはめ込みます。

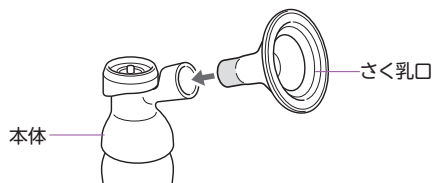


- 8 びんをボトルスタンドに立てます。

◆ポイント

ボトルスタンドをお使いいただくと、倒れにくくなります。

※電動部との接続のしかたは、電動部の取扱説明書をお読みください。


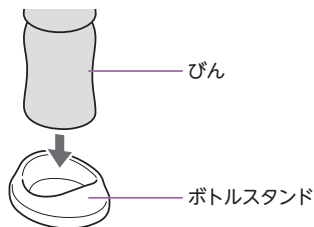


さく乳のしかた

★さく乳前に、石けんで手をよく洗って清潔にしてください。

さく乳口のあてかた

- 乳首が、さく乳口の中心にくるようにセットします。
- 空気がモレないように、ぴったりと密着させます。
- もう一方の手で、乳房を下から支えると、うまく密着できます。

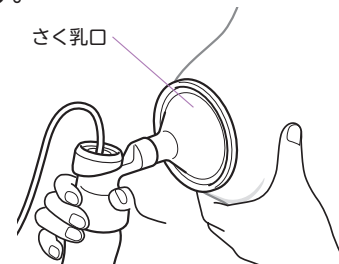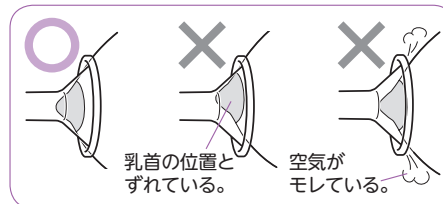


さく乳口・さく乳口パッドのサイズについて

- 付属のさく乳口・さく乳口パッドはMサイズです。ご自身の乳首に対し、さく乳口が小さい場合は、別売りのLサイズをご使用ください。

(P.14参照)

- さく乳口とさく乳口パッドは、それぞれサイズの表示部分をご確認の上、同じ表示の組み合わせでご使用ください。

※使用感のお好みで、さく乳口パッドを取り付けずに使うこともできます。

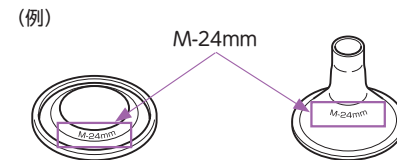

電動部の操作のしかた

電動部の操作のしかたは、電動Pro Personal R (プロパーソナル アール) の取扱説明書をお読みください。


母乳保存のしかた

冷蔵

母乳保存用シリコン蓋 (付属品)

- 母乳の冷蔵保存が簡単・衛生的にできます。
- ご使用前に必ず洗浄・消毒をしてください(P.4参照)
- 冷蔵庫から取り出した哺乳びんは、母乳保存用シリコン蓋を取り付けたまま湯せんすることができます。


1 母乳保存用シリコン蓋にキズ、汚れがないか確認します。

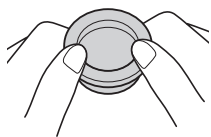

2 母乳保存用シリコン蓋をキャップの下からしっかりとめ込みます。



3 セット完了。
※座板がゆがんでいないか確認します。

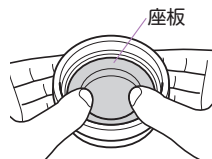

びんに取り付けて冷蔵保存できます。



△注意

- 冷凍保存には使えません。
- ガラス製哺乳びんに取り付けて湯せんしないでください。ガラス製哺乳びんは、急激な温度変化により割れる恐れがあります。
- 横向きでの使用はしないでください。母乳がこぼれる恐れがあります。

冷蔵・冷凍

母乳フリーザーパック (冷蔵・冷凍保存用/別売)

母乳の冷蔵・冷凍保存が簡単・衛生的にできます。
開けやすいファスナー部・広い口元で母乳が注ぎやすく、パックの内側に触れずに使える構造です。

母乳の保存期限 (目安) *1

	冷蔵保存 (4℃以下)	冷凍保存 (約-18℃)
さく乳直後の母乳	24時間	3ヵ月 (推奨) 6ヵ月 (使用可能)
解凍した母乳 *2	24時間*3	不可

*1 母乳は保存期限によらず早めにお使いいただくことをおすすめします。


*2 湯せん、または流水で解凍してください。

*3 解凍後の母乳は再保存できません。

冷凍母乳の解凍方法

いずれかの方法で母乳を解凍してください。*4

- 40℃前後のぬるま湯で湯せんする。
- 流水をあてる。

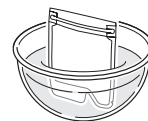

授乳適温にする方法

40℃前後のぬるま湯で湯せんしてください。*4



*4 解凍・湯せん後は、外側についた水滴が哺乳びんに入らないよう、清潔なガーゼなどで拭き取ってください。

- 保存中に母乳が分離することがありますが、栄養成分に影響はありません。混ぜてから授乳してください。
- おでかけの際は、冷凍状態で持ち運ぶことをおすすめします。

※詳しくは、各商品の取扱説明書をご覧ください。
※各商品の仕様は、予告なく変更することがあります。

お手入れのしかた



部品は、必ず分解してから、洗浄・消毒してください。

- 1 使用後は、すぐにぬるま湯につけます。
- 2 洗剤で、よく洗います。
- 3 消毒します。(P.4参照)


△注意

- 使う前に、必ず洗浄・消毒してください。
- 小さな部品があるため、洗浄時になくさないように注意してください。
- かためのブラシ・たわし・みがき粉などを使わないでください。表面にキズが付くことがあります。
- シリコンゴム製の部品の取り扱いには、十分に注意してください。乱暴に扱うと、破れたりキズが付くことがあります。

上手にさく乳できないとき

- さく乳口を乳房にあてた直後は、十分な吸引がかからないことがあります。しばらくさく乳口を乳房にあててから、以下を確認してください。
- 電動部 (別売) に本体部が2つ接続されている場合、両方のさく乳口が乳房にぴったりと密着していないと、十分な吸引がかかりません。

以下の確認は、本体部ひとつずつ行います。

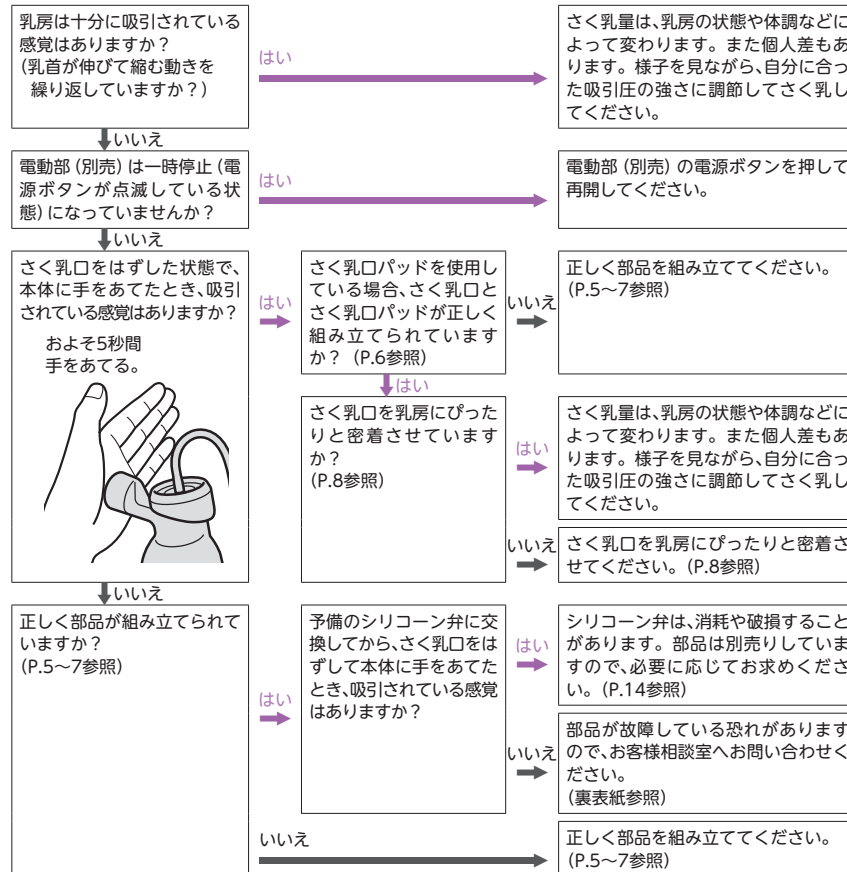

● 上記で解決しない場合はこちらをご覧ください。

<https://support.pigeon.co.jp/faq/list-19.html>



製品仕様

部 品	原材料	耐熱温度	消毒方法		
			煮沸	レンジ	薬液
本体キャップ	ポリプロピレン	120℃			
本体					
さく乳口					
ボトルスタンド					
キャップ					
ソフトカップ	シリコーンゴム	140℃	○	○	○
シリコーンキャップ					
シリコーン弁*1					
さく乳口パッド					
母乳保存用シリコーン蓋					
びん*2	ポリフェニルサルホン (PPSU)	180℃			
チューブ(コネクタ含む)	シリコーンゴム・ポリプロピレン	—	洗浄・消毒できません		

*1：シリコーン弁は予備1個付き。使用中に紛失・破損した場合にお使いください。

*2：びんの容量は、160ml(最大メモリ容量)びんの薄茶色は、素材本来の色です。(着色料無添加)

部品のご購入について

この商品の部品は、個別にお求めいただけます

A (店頭販売)：商品として販売しています。

店頭でお求めいただけます。(店舗により取り扱いがない場合があります。)

B (部 品)：部品として販売しています。

販売店でのお取り寄せ、もしくはピジョン公式オンラインショップでご購入できます。

	部品の名前	A	B	商品コード	JANコード
付属部品	本体キャップ		○	1000352	4902508020541
	本体		○	1007688	4902508020961
	さく乳口 (Mサイズ)		○	1024147	4902508002202
	ボトルスタンド		○	1000346	4902508020466
	キャップ	●1		1003648	4902508015172
	ソフトカップ		○	1000359	4902508020510
	シリコーンキャップ		○	1024149	4902508002226
	シリコーン弁		○	1024150	4902508002233
	さく乳口パッド (Mサイズ)		○	1024148	4902508002219
	母乳保存用シリコーン蓋		○	1021543	4902508000390
	びん	●2		1003622	4902508003544
	チューブ(コネクタ付き)		○	1007689	4902508020978
	別売部品	さく乳口 (Lサイズ)		○	1024153
さく乳口パッド (Lサイズ)			○	1024154	4902508002271

●1：キャップ・フードセット オレンジイエロー

●2：母乳実感哺乳びん 160ml オレンジイエロー SSサイズ乳首(びんのみ)の販売はしていません)

詳しくは、ピジョン公式オンラインショップ内の「部品販売商品一覧」をご覧ください。
お客様相談室にお問い合わせください。

●部品のご購入についてはこちらから

購入サイト <https://feature.pigeon.co.jp/product/parts/>

※お客様相談室の電話番号は本取扱説明書裏表紙をご確認ください。

